



Tarjeta Multipanel para detección de drogas en Orina.

Marca: Discover

Variante en 3 Paneles (Parámetros): THC/COC/MET

Variante en 5 Paneles (Parámetros): COC/AMP/MET/THC/OPI Variante en 6 Paneles (Parámetros): COC/AMP/MET/THC/OPI/BZO

Variante en 8 Paneles (Parámetros): COC/AMP/MET/THC/OPI/PCP/BAR/BZO



**CANTIDAD POR CAJA: 25 PIEZAS** 



## Tarjeta Multipanel

Diseño Económico y ultra seguro en tarjeta con tapa en tira reactiva expuesta.

Capacidad hasta para 8 Drogas diferentes.

Empaque Metalizado Sellado y Esterilizado.

Todas las variantes incluyen vaso esterilizado con termómetro Irreversible para confirmación de muestra fresca y recién depositada (evita la tergiversación de muestras y resultados). Con etiquetas de seguridad e inscripción de datos.

Tiempo garantizado de vida de 24 meses.

Tasa de precisión del 99.9%.

Resultados en menos de 1 minuto y pueden seguir siendo interpretados, 1 hora después de tomada la muestra.

Certificaciones: CLIA Waive / FDA 510K / CE Marked

## **METODO DE USO**

- Rompa el empaque metalizado sellado y esterilizado.
- Entregue al usuario que depositara la muestra, el vaso esterilizado que se entrega aparte de la tarjte.
- Solicite al usuario cerrar nuevamente el vaso con su tapa roscable una vez depositada la muestra. Identifique la prueba con los datos que solicitan la etiqueta del vaso.
- Verifique en el termómetro irreversible que este haya indicado alguna temperatura al momento de recibir la muestra en el vaso. Si el termómetro no indica ninguna temperatura, esto puede indicar que la muestra no es reciente o fresca.
- Destape el vaso esterilizado y sumerja la tarjeta cuidando no excederse del nivel marcado en la tarjeta como el máximo a sumergir.
- Espere unos segundos a que la muestra vaya subiendo por la tira reactiva y presente resultados que podrán leerse, según la siguiente tabla:

## LECTURA DEL RESULTADO CT T O T NEGATIVO (NO CONSUMIO) (SI CONSUMIO) LECTURA DEL RESULTADO C=CONTROL T=PRUEBA PRUEBA INVALIDA (REPETIR PRUEBA)

## Identificación de Drogas

THC Marihuana MOP Opiaceos BAR MDMA Metilenedioximetanfetamina Barbituricos COC Cocaina Metanfetaminas BZO TCA Antidepresivos Triciclicos MET Benzodiazepinas **AMP** Anfetamina Clorhidrato de Fenciclidina OXY Oxicodina **PCP** MTD Metadona